



1 PCR 検査キット内容物の確認をしましょう！

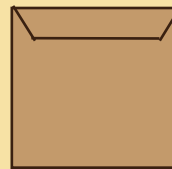

貼ってあります

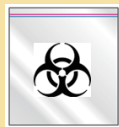

A：唾液採取用チューブ B：検査番号 C：バイオハザードバック D：白紙シール

緩衝材付きの
茶封筒に入れて
お届けしています

2 唾液を A のチューブの中に入れましょう

① A の唾液保存容器の蓋を開けます。喉にウイルスが溜まりやすいので、喉元を軽くマッサージしてから唾液を採取してください。




② 唾液を容器に 2-3mL 入れてください。蓋を最後までしっかりと締めます。

飲食の後、歯磨きを行った後、
最低10分以上、できれば30分
ほど開けることが望ましい
(2020/10/2 厚生労働省通達)

3 中に入っている白紙シールに、個人情報を「鉛筆」で記入して下さい。

※ボールペンで記入した場合は、セロハンテープで上から覆ってください。

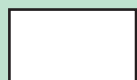

D：白紙シール

- ・お名前
- ・電話番号
- ・ご住所
- ・メールアドレス

そして、A のチューブ
に巻きつけて下さい。

陽性だった場合、管轄の保健
所への報告が必要となるため
「必ず」個人の連絡先をご登録
お願い致します。1つのメー
ルアドレスにつき、1つの結
果しかおくれません。会社の
住所などは書かないようにお
願います。

4 検体受付フォームに入力をしましょう

検体受付フォームは右の QR コードを読み取ってください。
<https://bit.ly/3iUERUx> (または、左の URL を入力)



※送信後自動返信がない場合は迷惑メール BOX をご覧ください。

重要！入力のない場合は検査結果を絶対にお伝えできません。その際も返金はいたしません。

5 発送準備をしましょう！



① チューブをバイオハザードバックに入れます。強く締め付けない程度にくるくる巻いてください。



② チューブの入ったバイオハザードバックを茶封筒に入れてください。茶封筒は軽くテープで止めてください。

このやり方以外での包装は禁止

6 発送をしましょう！



① 茶封筒をビニール袋に入れて、
その上で冷蔵でお送りください。
(3重包装が推奨されております。) 過重な包装は取り出す時に
大変なのでやめてください。

クールで配送ください

② 返送には宅配会社の冷蔵タイプの
配送サービスにてご返送ください。
ヤマト運輸が1番早く届き、検査結
果も早く受け取れますのでオススメ
です。佐川急便は+1日かかります。

配送先

〒761-0121

香川県高松市牟礼町牟礼 249 番地 5

パルネット荒木 103

Setolabo 衛生検査所 宛

※宅配伝票の品名欄には「検査キット」と書いて発払いでご返送ください。

検体のお持ち込みは
こちらでの予約が必須
(条件あり)

お客様サポート

LINE 公式アカウント
Setolabo 衛生検査所

@769glqyw



PCR 検査の結果について

検査結果は、検体到着日に即日に出ます。

夕方以降に到着した検体は翌日になります。検査結果は、検体受付フォームに入力いただいたメールアドレスに送付されます。

検査結果がこない！

- ・検体受付フォームが未記入
- ・メールアドレスが間違っている
- ・迷惑メール BOX に来ている
- ・そもそも検体が届いていない。



PCR 検査の結果の保健所への報告義務について

陽性と結果の出た方で本人へまずご連絡をさせていただきます。その次に、管轄の保健所へご連絡をさせていただきます。民間検査会社の検査結果の報告義務はありませんが、Setolebo 衛生検査所は全例報告とさせていただきます。予めご了承ください。



※ご本人様以外、会社など保健所以外は絶対に報告致しません。

※集団検査で各会社が社員様へ結果を把握する旨の同意をいただいている場合のみ、会社へ結果を報告します。

陽性の連絡を受けた場合はどうすればいいですか？

陽性の連絡を受けた場合は、「自宅にて」保健所からのご連絡をお待ちください。

ストップ！コロナ差別！

怖いのは新型コロナウイルスより誹謗中傷する人間です。

事実に基づかない
あなたのなにげない一言が
他人を傷つけています。



それ！中傷です！

「あの人コロナにかかったらしいよ。退院して外出歩いてるとか怖いな。」