



1 PCR 検査キット内容物の確認をしましょう！

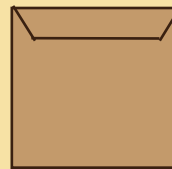

貼ってあります

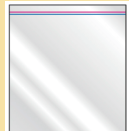

A：唾液採取用チューブ

B：検査番号

C：チャック付き袋

D：白紙シール

緩衝材付きの
茶封筒に入れて
お届けしています

2 唾液を A のチューブの中に入れてみましょう

① A の唾液保存容器の蓋を開けます。喉にウイルスが溜まりやすいので、喉元を軽くマッサージしてから唾液を採取してください。




② 唾液を容器の底から 1cm 入れてください。蓋を最後までしっかりと締めます。



飲食の後、歯磨きを行った後、最低10分以上、できれば30分ほど開けることが望ましい
(2020/10/2 厚生労働省通達)

3 中に入っている白紙シールに、個人情報を「鉛筆」で記入して下さい。

※ボールペンで記入した場合は、セロハンテープで上から覆ってください。

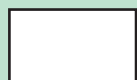・お名前
・電話番号

D：白紙シール

そして、A のチューブ
に巻きつけて下さい。

4 検体受付フォームに入力をしましょう

検体受付フォームは右の QR コードを読み取ってください。

<https://bit.ly/3iUERUx>（または、左の URL を入力）


※送信後自動返信がない場合は迷惑メール BOX をご覧ください。

法律上、登録衛生検査所での検査になり、患者情報の入力が必要です。




5 包装をします

これ以外での包装は絶対に禁止。加重包装の場合は検査をしません。

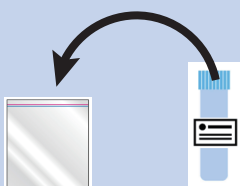

① チューブをチャック付き袋に入れてください。

禁止事項：テープでグルグル巻きにするなどの開封困難な状態にすること。

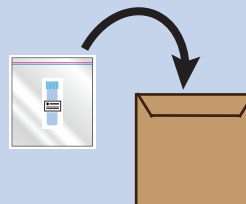

② チューブの入ったバイオハザードバックを茶封筒に入れてください。茶封筒は軽くテープで止めて閉じてください。

6 サテライトに持っていきましょう！！

サテライトのお持ち込みにはご予約不要です。
お近くのサテライトにお持ち込みいただくことで気軽に検査結果を知ることが可能です

このままの状態で提出！

お持ち込み先

※最新の情報は WEB ページをご覧ください。

香川県

〒761-0121
香川県高松市牟礼町牟礼 249 番地 5
パルネット荒木 103
Setolabo 衛生検査所
(WEB より持ち込みのご予約必須)

兵庫県

〒650-0014
兵庫県神戸市中央区元町
高架通 2-232
Setolabo 衛生検査所
神戸サテライト

愛知県

〒453-0801
愛知県名古屋市中村区太閤 1 丁目
8-1 青山ビル 3F
Setolabo 衛生検査所
名古屋サテライト

広島県

〒730-0027
広島県広島市中区薬研堀 1-3
あずまビル 1F
Setolabo 衛生検査所
広島サテライト

岡山県

非公開・岡山駅徒歩 5 分
(WEB より予約をして直接引き渡し)

大阪府

近日オープン予定
大阪市内

京都府

近日オープン予定
京都市内（京都駅近く）

PCR 検査の結果について

検査結果は、検体をお持ち込みされた日に即日が出ます。夕方以降に到着した検体は翌日になることもありますので、最新の情報はホームページ上、<https://setolabo.jp> でご確認ください。検査結果はホームページ上に掲示されます。

陽性時は医師による診断と発生届の提出が必須

陽性の結果が出た場合は、患者様ご本人へご連絡をさせていただきます。その後、医師のオンライン診療（無料）を経て発生届を保健所へ提出させていただきます。

※ご本人様以外、会社など保健所以外は絶対に報告致しません。

※集団検査で各会社が社員様へ結果を把握する旨の同意をいただいている場合のみ、会社へ結果を報告します。

よくある質問

Q：こちらの検査キットは郵送できますか？

日本郵便による郵送は 2021 年 2 月のルール改訂に基づき、専用の不活化溶液と専用の梱包容器をご使用しない限りはできません。ヤマト運輸、佐川急便は取り扱いをしておりません。Setolabo 衛生検査所へ「化粧品サンプル」などと記載して、送付をされる方がいらっしゃいますが、配送業者のルールを尊重していただくようお願いいたします。